





STOMISKYDD

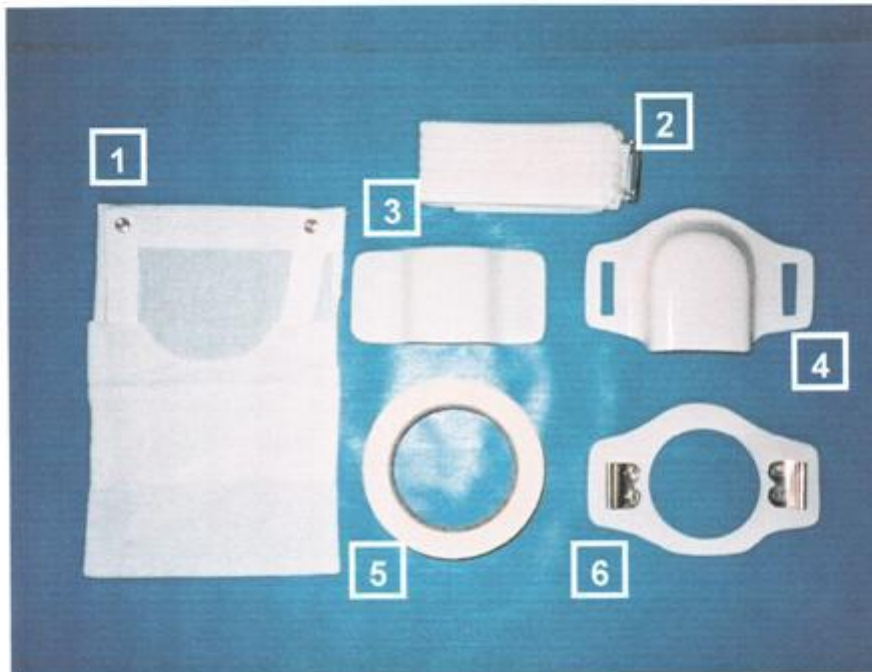

1. Skyddspåse
2. Bälte
3. Stomibåge
4. Skyddskåpa
5. Häftkuddar
6. Bygel

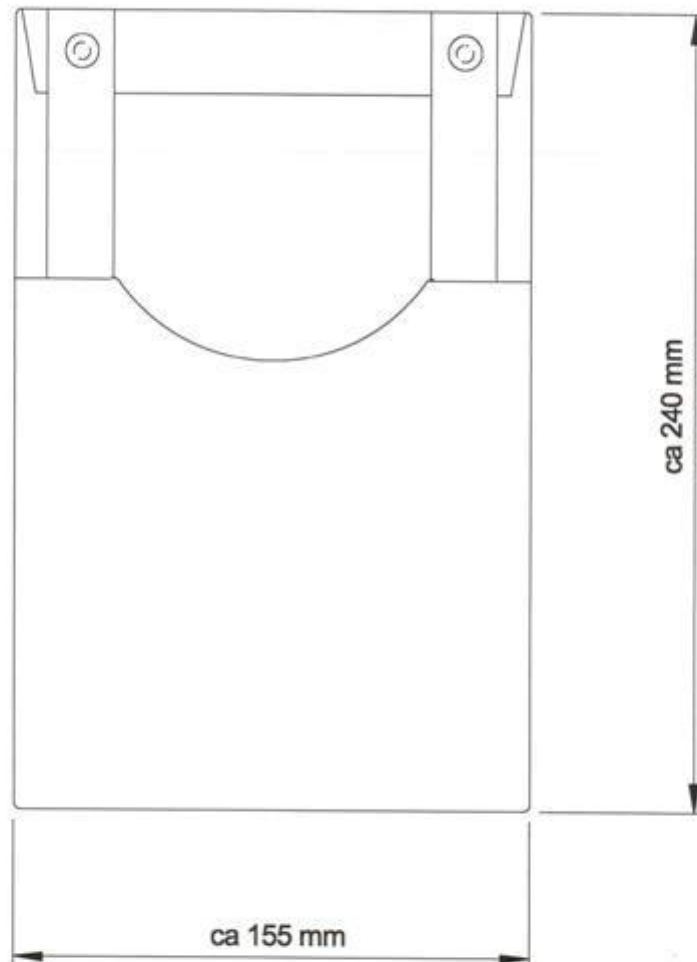

SKYDDSPÅSE STOMI


ART.NR: 090101

Skyddspåse för stomipåse tillverkad i 100% bomull, krymper 6% vid tvätt i 60 grader.

Nitar av nickelfri förkromad mässing.

Förpackning 1 st i plastpåse.

Apotekets varunummer 278515.

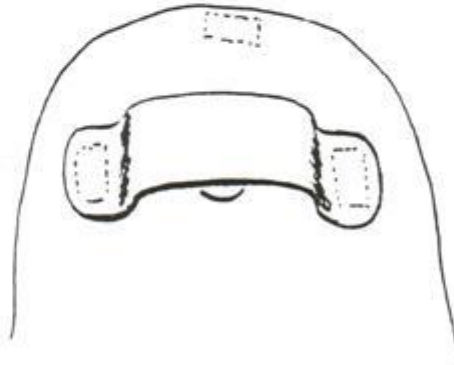

STOMIBÅGE

ART.NR: 471-220-1, 471-220-2

Stomibåge tillverkad i 2 mm vit PVC för att skydda stomin mot tryck eller skav.

Stomibågen fästs över stomin på påsens framsida med häftkuddar (art.nr: 471-220-10).

Den är lämplig för låga stomier, 1,5 – 2 mm höga.

Stomibågen finns i två höjder, 10 eller 14 mm.



Avståndet mellan stödytorna är 50 respektive 60 mm.

Till högre stomier eller då ett kraftigare skydd behövs bör istället en skyddskåpa (art.nr: 471-220-5) användas.


Ange önskad höjd vid beställning.

Alternativt kan stomibågen fås i specialutförande med högre höjd och större bredd (art.nr: 471-220-2).

Ange önskad höjd och bredd vid beställning.

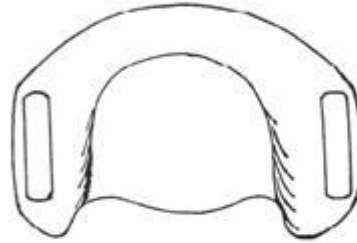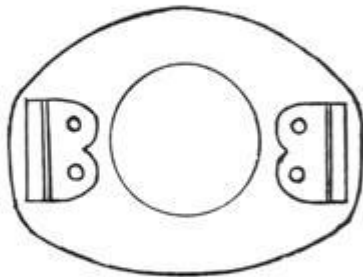

Ange mått E
och håldiameter
i bygeln

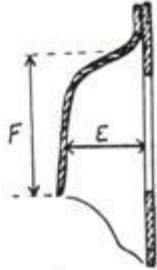

SKYDDSKÅPA MED BYGEL

ART.NR: 471-220-5 + 471-220-3/4

Skyddskåpa för stomi tillverkad i 2 mm vit PVC, som skyddar stomin mot slag.

Den kan användas till stomipåsar med fästkrage, tvådelsbandage och Chironbandage.

Skyddskåpan består av en bygel (art.nr: 471-220-3/4 och en skålförmad kåpa (art.nr: 471-220-5).

Bygeln fungerar som en vanlig bygel. Den skall ha så stort hål att den passar mellan påse och fästkrage till ett endelsbandage. Till ett tvådelsbandage skall hålet vara så stort att det passar till ytterdiametern av påsens ring, max. 70 mm.

Kåpan har springformade hål, som träs över krokarna i bygeln. Skålens djup (E) är så mycket som stomin putar ut, max. 35 mm.

Vid beställning skicka med påse och ange måttet (E).

Till kåpan används bälte nr 5 (art.nr: 471-220-6/7).